

ELEKTRICKÉ KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ ORTOPEDICKÉHO VOZÍKU Q'STRAIT INCLINE

Pomocí elektrického navíjecího zařízení vozíku snadno a bez cizí pomoci najede doprovodná osoba vozíkem i s vozíčkářem do zadní části automobilu. Elektrické kotvící zařízení, zajistí v automobilu bezpečné držení invalidního vozíku i s vozíčkářem za jízdy.

- ▶ Vozík je ukotven pomocí čtyř bezpečnostních pásů, které jej pevně a stabilně drží na požadovaném místě.
- ▶ Vozíčkář je připásan univerzálním bezpečnostním ramenním a bederním pásem.



Pohon: elektrický
Napájení: 12 V autobaterie vozu
Specifikace: obsluhu provádí doprovodná osoba



Obsluha:

1. Najedeme invalidním vozíkem před rampu na vhodné místo k naložení.
2. Pomocí pevného ovladače odvineme z navíjecího zařízení oba tažné pásy až k vozíku.
3. Vozík na vhodných místech bezpečně upneme.
4. Pomocí kabelového ovladače začneme navíjet na navíjecí zařízení tažné pásy, pomocí kterých najedeme vozíkem i s vozíčkářem na určené místo do zadní části vozu. (Joystickem regulujeme správný směr navíjení tažných pásů s vozíkem a vozíčkářem).
5. Zadní část vozíku bezpečně zajistíme schválenou upínací soupravou.
6. Při vykládání vozíku z vozu postupujeme opačným způsobem.



Země původu: USA